

智能护理通讯系统

快速使用手册

目录

主界面

主界面介绍>	1
-------	--------	---

信息卡

信息卡介绍>	2
-------	--------	---

呼叫

呼叫显示>	3
呼叫分机>	4
呼叫查询>	4

广播

话筒广播>	5
宣教广播>	5

系统设置

功能设置>	6
分机设置>	6
系统维护>	6

关联设置

房间管理>	7
床位管理>	7
初始化床位>	7

主界面介绍



主界面主要显示患者信息卡、时间、功能按钮、呼叫信息等。

患者信息卡

显示患者的各种信息, 单击可进入编辑窗口。

住院人数和呼叫信息

显示当前住院人数和呼叫信息。

信息卡介绍



- 显示患者所在床位号码和护理级别。
- 显示患者姓名、性别和年龄。
- 显示护理标识（在“系统设置”-“护理标识设置”里可以自定义）。
- 显示患者的入院时间、饮食和医保。

患者信息卡显示
房间、床位、护
理级别和患者姓
名。

单击选项卡进入
信息编辑和查看
状态，显示相应
信息，点击确认
后保存相应的信
息。

患者信息

患者信息

住院号	813152430		
姓名	刘夏		
性别	女		
年龄	21		
护理级别	一级护理		
医保类型	农村合作医院		
病情	骨折		

过敏	是	饮食	半流食
待产	是	乙肝	是
梅毒	是	性病	是
今日手术	是	HIV	是
流产	是	新生儿	是

备注

注意卧床休息

入院时间:

2014/ 8/13

出院

保存

关闭

呼叫显示



分机呼叫时会在主界面上显示相应的呼叫信息,信息卡会闪动,呼叫窗口显示的是当前正在呼叫的分机,单击正在呼叫的分机可以取消当前分机的呼叫。此时若有未处理呼叫时,呼叫窗口的右侧会显示一个未

当系统中有未处理的呼叫时,会显示如左图窗口,单击单条信息可以清除单个分机的存储,单击“一键清除”,将全清除。(当有分机正在呼叫时,必须先处理当前正在呼叫的分机,然后才能处理已经存储的分机)

呼叫分机

呼叫床头分机进行通话，有两种方式：

1. 拿起电话机,使用话机上的按钮进行拨号，要呼叫1床就拨“001”；
2. 拿起电话机，单击相应的患者信息卡进行拨号。

呼叫查询

在主界面上单击“呼叫查询”进入呼叫查询功能。

1. 回放通话录音：在启用通话录音功能的情况下可以使用；

	3	20:41:00 ...	20:41:01 ...		1秒	2012/6/18 20:41	主机呼叫,通话结束
---	---	--------------	--------------	--	----	-----------------	-----------

如上图带小喇叭的记录就是通话记录，单击小喇叭可以回放录音；

2. 还可以使用界面右侧的高级查询功能将记录进行筛选。

广播

本系统有两种广播方式：

1. 话筒广播（使用电话机话筒进行人工广播）；
2. 宣教广播（将电脑上的音乐播放到分机上）。

话筒广播

进入话筒有两种方式：

- 1、拿起电话机话筒，单击宣教广播按钮，此时将进入话筒广播状态；
- 2、在宣教广播正在进行的时候，拿起电话机话筒，此时将停止音乐播放，进入话筒广播

宣教广播

在电话机挂机状态下，点击宣教广播按钮，进入宣教广播功能。



本功能可以将电脑上的音乐播放到床头分机，步骤如下：

- 1、点击播放列表编辑区域的添加按钮，将音频文件加入到播放列表中；
- 2、在播放列表中双击需要播放的音乐文件；
- 3、点击“宣教广播”按钮，开始广播（此时“宣教广播”按钮显示为“停止广播”），可以使用音量调节功能调节音量大小；
- 4、要停止宣教广播，单击“停止广播”按钮即可。

系统设置

在主界面上单击“系统设置”进入该功能。

1. 功能设置

A. 报号音量：拖动滑块进行报号音量设置，滑块后面的按钮可以试听音量大小。白天和夜间可以设置不同的音量，设置白天夜间时段在“分机设置”里进行说明。

B. 床位显示：可以调节主界面上患者信息卡显示的方式；

C. 护理级别：修改护理级别显示的颜色，单击要修改的护理级别进行修改；

D. 设置主界面标题：设置主界面上“自定义显示区”显示的文字；

E. 房间床位管理：设置床位和房间（见床位关联和设置）；

F. 护理标识设置：设置床位卡上的自定义标识显示；

G. 联网设置：用于HIS联网的相关设置。

2. 分机设置

A. 分机铃声：设置分机呼叫是播放的和旋音乐；

B. 白天振铃时段：设置白天和夜间的时段；

C. 分机振铃时长：设置分机呼叫时话机振铃的时长。

3. 系统维护：

A. 分机改号：要对分机进行改号，需先进入改号状态，然后用需要改号的分机进行呼叫，在电脑收到改号请求后，输入要修改的号码点击“设定”即可；

（注：对定位分机改号还需要勾选“定位分机改号”复选框）

B. 设置广播机：要设置广播机，只须在列表里面勾选需要设置的分机即可；


C. 巡检分机：要巡检分机，先选择分机类型，再选择巡检范围，然后点击“开始检测”即可；

D. 清空缓存、清空录音和恢复出厂值：用于清除系统中的数据和恢复所有设备的出厂设置。

关联设置

如何添加一个房间关联：

- 点击新添房间，分别输入房间号、门灯号、定位分机号和卫生间分机号（无门灯、定位分机和卫生间分机输入“0”）；
- 点击分机列表项，在弹出的床位列表中选入相应的床位；

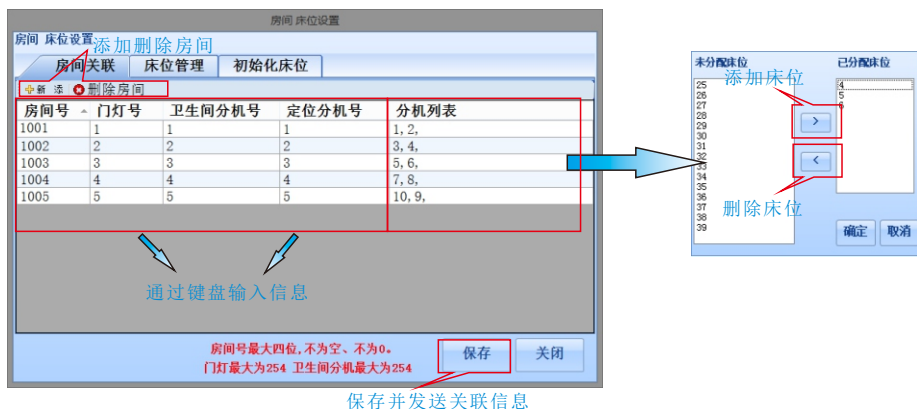

床位管理：用于添加或删除单个床位；

初始化床位：在床位数一栏中输入需要设置的床位数量，点击“设置”进行初始化，注：初始化操作将删除现有床位的所有信息。