

菜单列表:

系统广播	时间设定	护理级别设定	铃声设定	分机音量	护士定位
------	------	--------	------	------	------

一、系统广播

按“菜单/确定”键，进入功能设定，按“上翻”/“下翻”键选中系统广播，按“菜单/确定”键进入，摘起电话机手柄进入话筒广播（话筒广播优先）。若患者不想听，按分机上的清除键可关闭广播；再按一次即可恢复。按“返回”键可退出广播。话筒广播时，分机呼叫，主机不振铃，但主机一览表上对应的床位指示灯 闪烁提示。

二、时间设定

设定年、月、日、星期、小时、分钟。

三、护理级别设定

连续按主机一览表中的床位号码，指示灯会按“红色、绿色、黄色、熄灭”的顺序循环显示。

红色为一级护理，黄色为二级，绿色为三级，灯灭为空床位。设定完成，按“菜单/确定”键保存退出。

待机界面的**住院人数** 即是护理级别设定的亮灯的床位个数。

四、铃声设定

振铃模式	振铃时长	振铃音量	循环提示
------	------	------	------

1、 振铃模式

和弦音乐振铃	语音报号	无声模式
--------	------	------

振铃模式主要用于设置分机呼叫时主机的振铃提示音类型：

- 1) 当选定和弦音乐振铃后，主机播放振铃音乐并显示序号，按“上翻”/“下翻”键 选曲，在主机一览表中按亮（会亮黄灯）要设定的分机号码，设定成功；则按亮的这些分机呼叫时主机将播放此序号的振铃音乐。本系统有多首乐曲可供选择。
- 2) 当选定语音报号模式后，分机呼叫时，主机会语音报号提示护士。如 5 房间 6 床的分机呼叫时，主机就会播报 5 房间 6 床呼叫。
- 3) 当选定无声模式后，分机呼叫时主机不会出声提示护士。

2、 振铃时长

可设定振铃时间：5 秒、10 秒、20 秒、30 秒、长响等。

3、 振铃音量

有白天、夜间音量各 8 级可调；通过按“上翻”/“下翻”键选择，再按“菜单/确定”键保存依次设定：白天音量—白天音量起始时间—夜间音量—夜间音量起始时间，最后按“菜单/确定”键保存。

4、 循环提示

选中后只要有存储分机未被处理，主机将循环振铃或播报存储的分机号码等信息，直到清除为止。

五、分机通话音量

可设定通话时的分机音量，共 8 级，按“上翻”/“下翻”键选择，再按“菜单/确定”键保存。

六、护士定位

护士进入病房前，按一下病房门口的“护士专用”分机，绿灯亮则表示护士进此房间，同时主机窗口会显示护士所在的房间号，并且当其它病房有分机呼叫时，护士所在病房的分机会语音提示当前呼叫的分机号码。

护士离开病房时，必须再按一下病房门口的“护士专用”分机，灯灭，表示护士离开此房间。

七、系统密码：987